

III. UWAGI EKSPLOATACYJNE

- Do mycia i dezynfekcji stosować należy łagodne preparaty posiadające atest Państwowego Zakładu Higieny. Nie używać środków ściernych!
UWAGA: do mycia powierzchni miękkich nie wolno stosować środków na bazie benzyn, rozpuszczalników, kwasów, chloru, itp.!
- Cechowania wyrobów dokonano w postaci etykiety identyfikacyjnej, naklejonej na każdej sztuce. Znajdują się tam następujące dane:
 - Dane producenta
 - Nazwa i model wyrobu, np.: REF 01/MR
 - Data produkcji w formacie: LOT RRRR-MM (gdzie RRRR oznacza rok, a MM oznacza miesiąc, np. 2023-08)
 - Dopuszczalna masa użytkownika
- Wszystkie wyroby (poza nasadkami) posiadają 2-letnią gwarancję.**
- Używać wyroby zgodnie z ich przeznaczeniem!** Ewentualne zagięcia elementów metalowych z widocznymi pęknięciami powierzchni eliminują wyrób z dalszego użytkowania.
Nakazuje się sprawdzanie wyrobu przed i podczas użytkowania w celu upewnienia się, że podczas eksploatacji nie powstały zarysowania, pęknięcia itp., czy zużycie nasadki.
- Serwis produkcyjny w okresie gwarancji (24 miesiące) obejmuje wymianę podzespołów lub wyrobów, w których stwierdzono wady produkcyjne.
- Serwis eksploatacyjny MIKIRAD funkcjonuje bezpośrednio w punktach sprzedaży wyrobów.
- MIKIRAD zapewnia produkcję części zamiennych przez 10 lat od daty wykonania wyrobu.



MODEL WYROBU

PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY

DATA SPRZEDAŻY



**Użytkownikom naszych wyrobów życzymy pełnej satysfakcji.
Prosimy o ewentualne uwagi w celu dalszego ich doskonalenia.**

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KUL ŁOKCIOWYCH

Firma MIKIRAD produkuje **kule łokciowe** jako wyroby medyczne służące do poprawy mobilności osób niepełnosprawnych (wg Normy Zakładowej ZN-00/MK-01-2/2010 zharmonizowanej z Normą PN-EN ISO 9999 - klasa 12 03 oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 [MDR] z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych).

PN EN ISO 9999	NAZWA WYROBU	MODEL
12 03 06	Kula łokciowa:	
	- podwójna regulacja wysokości, podpórka odchylana	-01/MR
	- podwójna regulacja wysokości, podpórka odchylana, miękki uchwyt	-01/MR"M"
	- podwójna regulacja wysokości, podpórka stała	-02/MR
	- podwójna regulacja wysokości, podpórka stała, miękki uchwyt	-02/MR"M"
	- regulowana dziecięca, miękki uchwyt	-03/MR"M"
	- regulowana dziecięca, miękki uchwyt, nasadka czteropunktowa	-03/MR "M" +13/MR/4
	- pojedyncza regulacja wysokości, podpórka stała	-04/MR
	- pojedyncza regulacja wysokości, podpórka stała, miękki uchwyt	-04/MR"M"
	- pojedyncza regulacja wysokości, podpórka stała, ergonomiczny uchwyt do prawej i do lewej dłoni	-04/MR.E.L -04/MR.E.P
	- pojedyncza regulacja wysokości, podpórka stała, opaska na przedramię	-04/MR.O
	- pojedyncza regulacja wysokości, podpórka stała, opaska na przedramię, miękki uchwyt	-04/MR.O"M"
	- pojedyncza regulacja wysokości, podpórka odchylana	-05/MR
	- pojedyncza regulacja wysokości, podpórka odchylana, miękki uchwyt	-05/MR"M"
	- pojedyncza regulacja wysokości, podpórka odchylana, ergonomiczny uchwyt do prawej i do lewej dłoni	-05/MR.E.L -05/MR.E.P
	- pojedyncza regulacja wysokości, podpórka odchylana boczna	-08/MR
	- pojedyncza regulacja wysokości, podpórka odchylana boczna, miękki uchwyt	-08/MR"M"
	- pojedyncza regulacja wysokości, podpórka odchylana boczna, ergonomiczny uchwyt do prawej i do lewej dłoni	-08/MR.E.L -08/MR.E.P
	- podwójna regulacja wysokości, podpórka odchylana boczna	-09/MR
	- podwójna regulacja wysokości, podpórka odchylana boczna, miękki uchwyt	-09/MR"M"


I. UWAGI OGÓLNE

Standardowe wyroby przeznaczone są dla użytkowników o wzroście do 185 cm i masie do 130 kg., a w przypadku kul dziecięcych dla osób o wzroście od 135 do 150 cm i wadze do 80 kg. Niezalecane przy braku jednej kończyny dolnej.

Poszczególne wyroby dopasowuje się do wzrostu użytkownika poprzez przesunięcie połączonych ze sobą teleskopowo rurek do uzyskania żądanej wysokości, a następnie ich zablokowaniu.

Ustalenie wysokości wyrobu uznaje się za właściwe, jeśli w czasie korzystania z wyrobu użytkownik przyjmuje wyprostowaną pozycję ciała, a wyrób pracuje pionowo, tj. w płaszczyźnie równoległej do osi ciała.

Właściwa regulacja wysokości oraz poprawna eksploatacja naszych wyrobów znacznie wydłuża okres ich użytkowania oraz zapewnia uczucie bezpieczeństwa i zadowolenia użytkownika.

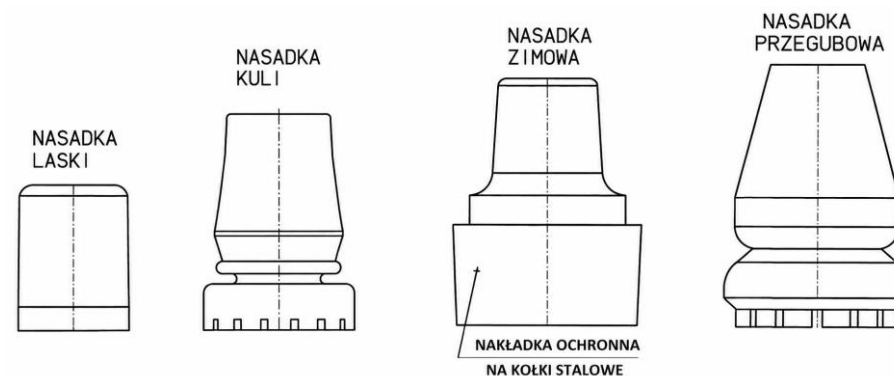


Rys.1 Rodzaje nasadek

II. KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY SKOKOWEJ REGULACJI WYSOKOŚCI KUL ŁOKCIOWYCH - Rys. 2

1. Wypchnąć z otworów zatrząsk podwójny w ten sposób, że dwoma kciukami naciskamy na obydwa czoła skrzydełek zatrząsku w kierunku grzbietu, co spowoduje ugięcie skrzydełek i wysunięcie stalowych kołków z otworów rurek.

Zabrania się odginania skrzydełek zatrząsku, gdyż mogą ulec złamaniu lub utracą sprężystość.

2. Przesunąć rurkę regulacyjną wzdłuż osi na odpowiadającą użytkownikowi wysokość pamiętając, że otwory rurki regulacyjnej muszą idealnie pokrywać się z otworami korpusu.
3. Włożyć stalowe kołki zatrząsku w ustawione otwory i dłoń wcisnąć zatrząsk do pełnego przylgnięcia wewnętrznej powierzchni zatrząsku do korpusu rurki.

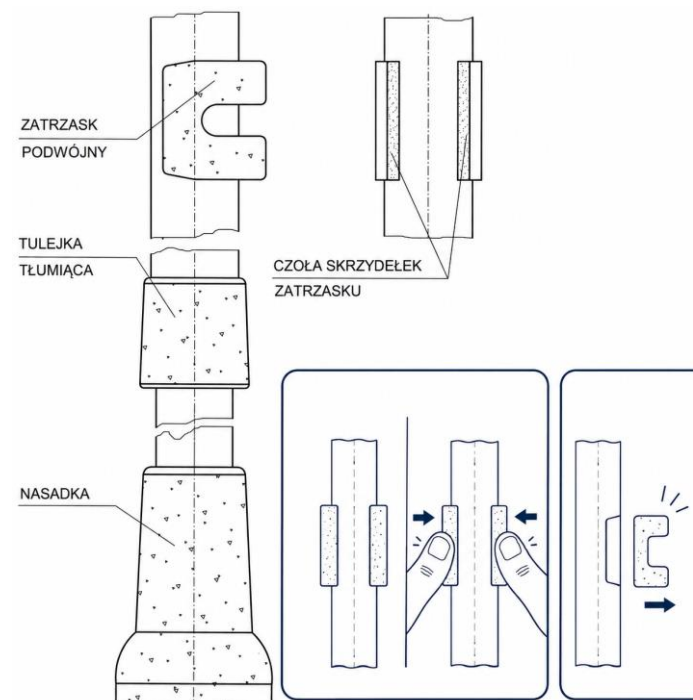

Rys.2 Regulacja skokowa

Uwaga: w okresie zimowym należy stosować nasadkę zimową (antypoślizgową, z kołkami stalowymi)